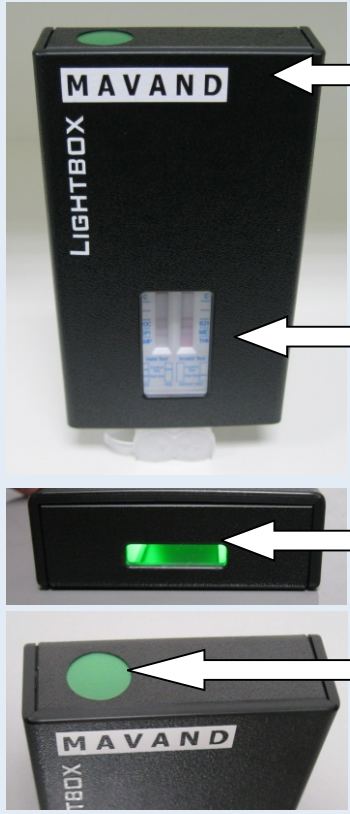



ANLEITUNG LIGHTBOX

1202-MV-0729

	<p>LIGHTBOX</p> <p>Sichtfenster</p> <p>Einschub</p> <p>AN/AUS Schalter</p>
	<p>TEST EINSCHIEBEN: Schieben Sie den Test bis zum Anschlag ein.</p> <p>LICHT ANMACHEN UND ERGEBNIS ABLESEN: Drücken Sie auf den grünen AN/AUS-Schalter und lesen Sie die Ergebnisse durch das Sichtfenster ab.</p> <p>Bei Nichthalten des grünen AN/AUS-SCHALTERS wird das Licht automatisch wieder ausgeschaltet.</p> <p>Zum Schutz des Sichtfensters und Geräts vor Kratzern, Schmutz- und Staubpartikeln, bringen Sie die LIGHTBOX bitte nach Gebrauch immer in die Schutzhülle zurück.</p>