



## RAPID Saliva SET™

Das **RAPID Saliva SET™** im **Clip-System** ist ein neues System für die Entnahme, die Aufbewahrung und den Transport von Speichelproben im Zusammenhang mit dem Nachweis von illegalen Drogen mittels einer standardisierten Laboranalyse (Immunoassay, GC-MS, LC-MS).



### Technologie



Der neu entwickelte patentierte Probenaufnehmer ist mit einer einzigartigen feinen Microfaser ausgestattet, die es ermöglicht, schnell Speichel und möglicherweise darin enthaltene Drogensubstanzen aufzunehmen. Es ist nicht notwendig, eine große Menge an Speichel zu sammeln. 0,15 bis 0,3 ml reichen aus, um alle möglichen Konzentrationen zu sammeln.



Die Pufferlösung gewährleistet, dass die fettbindende Droge aus der Microfaser herausgewaschen wird. Es ist keine aufwändige Prozedur einer Extrahierung notwendig. Das Pufferspeichelgemisch kann direkt genutzt werden.

### BEDIENERFREUNDLICH



Das **RAPID Saliva SET™** im **Clip-System** kann in 3 Schritten einfach, schnell und hygienisch abgearbeitet werden. Entnehmen Sie die Probe für 30 Sekunden, waschen Sie 10 Sekunden die Probe aus und verschließen das Probenröhrchen. Die Entnahme kann einfach überwacht werden und wahrt die Privatsphäre des Probanden.

### Anwendungsbereich



Das **RAPID Saliva SET™** im **Clip-System** ist einsetzbar im Rahmen des Drogen-Monitorings bei Präventionskampagnen, Rehabilitationsmaßnahmen, Zugangskontrollen und Sicherheitsprüfungen sowie bei Verdacht auf Substanzmissbrauch am Arbeitsplatz.

### SERVICE



Die Probe kann in einer Primärverpackung an den analytischen Service der MAVAND Solutions GmbH gesandt werden oder zu einem anderen beauftragten Labor.