




**Eintauchen des Rapid TOX™**  
Test ca. 3-5 Sekunden lang in den Urin bis zur Markierung eintauchen.

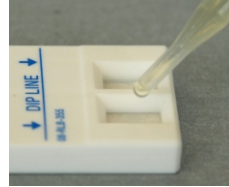

**Pipettieren des Rapid TOX™**  
Nach und nach mit der Pipette jeweils 3-4 Tropfen Urin in jede Öffnung geben.



**Minimum-Mengenverfahren des Rapid TOX™**  
Kassette mit dem unteren Ende direkt auf einen Tropfen Urin stellen.  
Der Urin wird von den Teststreifen aufgenommen.



Linien bilden sich nach kurzer Zeit.  
Die Ergebnisse sind 4 Stunden stabil und auswertbar, solange der Test in einem luftdichtem Plastikbeutel aufbewahrt wird.  
Ablesen der Testresultate siehe Rückseite.

### AbleSEN der Testresultate

Sobald sich die Kontrolllinie gebildet hat und der Hintergrund klar geworden ist (normalerweise nach ca. 3-5 Minuten) können die Ergebnisse abgelesen werden. Die Intensität der Linien kann variieren.

